

UMONIUM³⁸
master in disinfection



การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์

- ✓ ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง
- ✓ ออกฤทธิ์กว้าง ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์
- ✓ ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- ✓ ไม่กัดครื่องพื้นผิวเครื่องมือแพทย์ ใช้ได้กับทุกวัสดุ
- ✓ ออกฤทธิ์รวดเร็ว
- ✓ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ✓ มาตรฐานวงการแพทย์ยุโรป EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
- ✓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 1639





UMONIUM³⁸
master in disinfection

น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิว



MEDICAL SPRAY

หัวสเปรย์ใช้ได้ 2 แบบ ทั้งสเปรย์โฟมและสเปรย์ละออย

วิธีใช้

1. สเปรย์น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วเช็ดคราบสกปรกออก หรือปรับหัวฉีดตำแหน่งโฟมลงบนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อนส่งไปล้างทำความสะอาดเครื่องมือ
2. สเปรย์ลงอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อ ทั้งไว้เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 – 10 นาที
3. ทิ้งไว้ให้แห้งหรือฉีดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด



MEDICAL TISSUES

สามารถทำลายเชื้อครอบคลุมภายในเวลา 1 นาที

วิธีใช้

1. ดึงกระดาษชุบน้ำยาทำลายเชื้อออกมาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ เช่น ถาดใส่เครื่องมือ เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น
2. ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วินาที
3. ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือทิ้งไว้ให้แห้ง

น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ **STERILY**



- ☒ มีประสิทธิภาพกำจัดคราบสารคัดหลั่ง คราบเลือด โปรตีน
- ☒ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เช่น ทรงสั้ว เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา STERILY 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 5 ลิตร
2. แช่เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. จด ดู อุปกรณ์ใต้น้ำ หรือใช้เครื่องอัลตราโซนิกเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกออก
4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
5. ทำอุปกรณ์ให้แห้ง เพื่อเข้าสู่การทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูงต่อไป



น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดมีสีและกลิ่น **INSTRUMENTS**



ครอบคลุมการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา INSTRUMENTS 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร
2. เช็ดเครื่องมือที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. ล้างออกด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง
4. ทำให้แห้ง จัดเก็บเป็นเครื่องมือปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งาน

น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดไร้สี-ไร้กลิ่น **NEUTRALIS**



ครอบคลุมการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา NEUTRALIS 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร
2. เช็ดเครื่องมือที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. ล้างออกด้วยน้ำกลั่น หรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง
4. ทำให้แห้ง จัดเก็บเป็นเครื่องมือปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งาน

น้ำยาทำลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ **AIR CONTROL MATIC**



- ☒ ทำลายเชื้อไวรัสและไมโครแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☒ สามารถจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

วิธีใช้

1. ติดตั้งเครื่องพ่นทำลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ
2. ตั้งช่วงเวลาในการสเปรย์ได้ สามารถตั้งได้อย่างต่อเนื่อง
3. สเปรย์ในขณะที่มีผู้ใช้งานอยู่ในห้องได้

ส่วนประกอบหลัก

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/ N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride.


บริเวณที่ควรทำความสะอาดและทำลายเชื้ออยู่เสมอ



ห้องตรวจรักษา

ห้องปฏิบัติการ

ห้องเตรียมการผ่าตัด

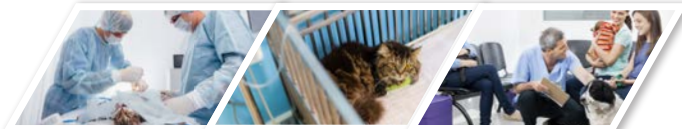

ห้องผ่าตัด

ห้องพักสัตว์

พื้นที่พักคอย



โรคติดเชื้อที่พบบ่อยจากสัตว์เลี้ยง

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

เกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสเรบีส (Rabies virus) กลุ่มเชื้อที่สำคัญในบ้านเราคือ สุนัขร้อยละ 95 แมวร้อยละ 4 สัตว์เลี้ยง โค กระบือ สุกร ม้า และสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนม ร้อยละ 1 อาการโรคเริ่มตั้งแต่สัตว์มีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ต่อมาจะเริ่มกระวนกระวาย คุ้ยขยะ และสุดท้ายสัตว์เลี้ยงจะเป็นอัมพาต น้ำลายไหล ชากรรไกรห้อยและตายในที่สุด




โรคลำไส้อักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ พาร์โวไวรัส (Parvovirus) โคโรนาไวรัส (Coronavirus) และโรตาไวรัส (Rotavirus) ชนิดที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงที่สุดคือ “พาร์โวไวรัส” ซึ่งมีผลต่อลำไส้สัตว์ทำให้เกิดอาการอาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารและผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจมักพบในลูกสุนัขอายุตั้งแต่ 2-6 เดือน



โรคท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรีย

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ *Campylobacter* และ *Salmonella* สามารถติดต่อจากสุนัขหรือแมวมายังคนจากการสัมผัสมูลของสัตว์ได้ โดยมีอาการอุจจาระเหลวขึ้น สีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองแก่เป็นเวลาหลายวัน บางครั้งอาจมีอาการไม่ย่อยออกมาด้วย

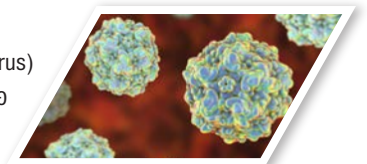

BANGKOK ADVANCED
TECHNOLOGY CO., LTD.

laboratoire
HUCKERT'S
INTERNATIONAL
mastered disinfection

ผู้นำเข้า

บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)

46/168 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 02-184-2514, 094-757-7978

www.batco.co.th

ผู้จัดจำหน่าย

