


UMONIUM^{®38}
master in disinfection



การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม

- ✓ ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง
- ✓ ออกฤทธิ์กว้าง ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์
- ✓ ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- ✓ ไม่กัดกร่อนพื้นผิวเครื่องมือแพทย์ ใช้ได้กับทุกวัสดุ
- ✓ ออกฤทธิ์รวดเร็ว
- ✓ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ✓ มาตรฐานวงการแพทย์ยุโรป EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
- ✓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 1639



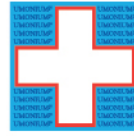

UMONIUM³⁸
master in disinfection

น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิว



MEDICAL SPRAY

หัวสเปรย์ใช้ได้ 2 แบบ ทั้งสเปรย์โฟมและสเปรย์ละอียด

วิธีใช้

1. สเปรย์น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์ทางทันตกรรม ยูนิต โคโมไฟ แล้วเช็ดคราบสกปรกออกหรือปรับหัวฉีดตำแหน่งโฟมลงบนเครื่องมือ อุปกรณ์ทันตกรรม ก่อนส่งไปล้างทำความสะอาดเครื่องมือ
2. สเปรย์ลงอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อ ทั้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 – 10 นาที
3. ทิ้งไว้ให้แห้งหรือเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด



MEDICAL TISSUES

สามารถทำลายเชื้อครอบคลุมภายในเวลา 1 นาที

วิธีใช้

1. ดึงกระดาษชุบน้ำยาทำลายเชื้อออกมาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวของยูนิตทำฟัน มือจับโคโมไฟ แผงควบคุม ถาดใส่เครื่องมือ
2. ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วินาที
3. ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือทิ้งไว้ให้แห้ง

น้ำยาล้างเครื่องมือทันตกรรม **STERILY**



- ☒ มีประสิทธิภาพทำความสะอาดสารคัดหลั่ง คราบเลือด โปรตีน
- ☒ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา STERILY 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 5 ลิตร
2. แช่เครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. จัด ถู อุปกรณ์ใต้น้ำหรือใช้เครื่องอัลตราโซนิคเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกออก
4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
5. ทำอุปกรณ์ให้แห้ง เพื่อเข้าสู่การทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูงต่อไป

น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดมีสีและกลิ่น **INSTRUMENTS**



ครอบคลุมการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา INSTRUMENTS 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร
2. แช่เครื่องมือทางทันตกรรมที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. ล้างออกด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง
4. ทำให้แห้ง จัดเก็บเป็นเครื่องมือปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งาน

น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดไร้สี-ไร้กลิ่น **NEUTRALIS**



ครอบคลุมการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา NEUTRALIS 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร
2. แช่เครื่องมือทางทันตกรรมที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
3. ล้างออกด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง
4. ทำให้แห้ง จัดเก็บเป็นเครื่องมือปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งาน

น้ำยาทำลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ **AIR CONTROL MATIC**



- ☒ ทำลายเชื้อไวรัสและไมโครแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☒ สามารถจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

วิธีใช้

1. ติดตั้งเครื่องพ่นทำลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ
2. ตั้งช่วงเวลาในการสเปรย์ได้ สามารถตั้งได้อย่างต่อเนื่อง
3. สเปรย์ในขณะที่มีผู้ใช้งานอยู่ในห้องได้

ส่วนประกอบหลัก

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/ N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride.

ทำไมต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในงานทันตกรรม?

- ภายในช่องปากเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายชนิด
- ระบบนิเวศภายในช่องปากเหมาะสำหรับการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้ก่อโรคและการติดเชื้อ



ดังนั้นจึงควรดูแลทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดการปนเปื้อนแพร่กระจายเชื้อทั้งกับบุคลากรและผู้มารับบริการ

เรามีโอกาสติดเชื้อได้อย่างไร



ทางตรง จากการสัมผัสเลือด สัมผัสเยื่อเมือก สารคัดหลั่ง ละอองฝอยหรือการกระเด็นของเลือดหรือน้ำลายเข้าสู่เยื่อเมือกผิวหนังที่บาดเจ็บหรือมีแผลและการหายใจเอาเชื้อก่อโรคมาระบบทางเดินหายใจ

ทางอ้อม ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนใช้ซ้ำ

การดูแลทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์

- เครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ เช่น เครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ในช่องปาก ต้องทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อในระดับปานกลางก่อนการนำกลับมาใช้ใหม่
- เครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อปานกลาง ต้องทำลายเชื้อในระดับสูงหรือทำให้ปลอดเชื้อ
- เครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ต้องทำให้ปลอดเชื้อเท่านั้น



การดูแลทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม



- **พื้นผิวที่สัมผัสในขณะให้การรักษาผู้ป่วย** เช่น เก้าอี้ทำฟัน คัมจับโคมไฟ ภาควางเครื่องมือ ฯลฯ ต้องมีการดูแลทำความสะอาดและทำลายเชื้อก่อนให้บริการผู้ป่วยรายต่อไป
- **พื้นผิวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโดยตรง** เช่น อ่างล้างปาก พื้นห้อง ผนังห้อง ตู้เก็บของ เป็นต้น ต้องมีการดูแลทำความสะอาดและทำลายเชื้ออย่างเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการให้บริการในแต่ละวัน




BANGKOK ADVANCED
TECHNOLOGY CO., LTD.

 **laboratoire**
HUCKERT'S
INTERNATIONAL
mastered disinfection

ผู้นำเข้า

บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)
46/168 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-184-2514, 094-757-7978
www.batco.co.th

ผู้จัดจำหน่าย